

## AURICULARES INDUCTIVOS ESTEREOFONICOS

Auriculares inductivos anatómicos con conector estereo de 3.5mm para uso con audífonos retroauriculares y procesadores de implante coclear.

Los auriculares inductivos proporcionan una salida magnética para el uso de las prótesis auditivas en la posición T. Este sistema transmite la señal estereofónica, ya que posee dos auriculares con forma de gancho que se adaptan a los pabellones auditivos de cada uno de los oídos. Los auriculares inductivos se pueden usar con cualquier equipo que tenga un conector de audio de 3.5mm como por ejemplo Ipods, mp4, ...

Sitúe cada auricular en forma de gancho en el pabellón auditivo entre la prótesis y la cabeza y enchufe el conector al reproductor. Cambie sus prótesis a la posición T. En el momento que reproduzca la señal, usted la escuchará a través de sus prótesis.

La intensidad de la inducción magnética recibida varía con la posición relativa del gancho con la prótesis. Muévalos hasta tener la señal óptima.

